



Incidin® Rapid


DESINFECTANTE DE ALTA EFECTIVIDAD



Incidin® Rapid es un eficaz desinfectante para zonas hospitalarias de alto riesgo. Alta capacidad de desinfección.

De amplio espectro bactericida, levuricida, viricida (incluyendo rotavirus, adenovirus, polio, papovavirus, virus de la Hepatitis B (VHB), virus de la Hepatitis C (VHC), el virus del SIDA (VIH)); y esporicida frente a *Clostridium difficile*.


Área de aplicación: Adecuado para cualquier superficie susceptible de ser lavada.

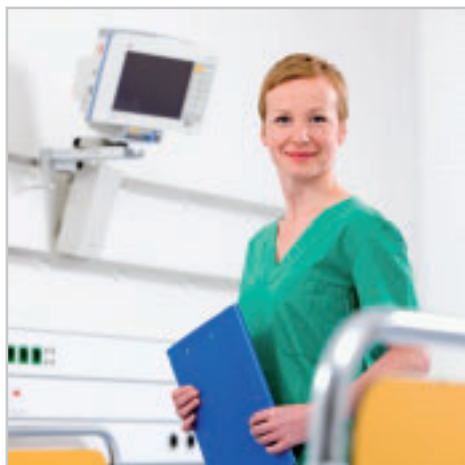

Resultados Microbiológicos y virológicos	Concentración		Tiempo de contacto
	%	ml / L	
Bactericida (EN 13727) y levuricida (EN 13624) (1)	0.25	2.5	1 h.
	0.5	5	30 min.
	0.75	7.5	5 min.
Viricida frente a virus encapsulados (de acuerdo con RKI (autoridad alemana) recomendación 01/2004) incl. VIH, VHB y VHC	0.25	2.5	5 min.
Eficaz frente a - Adenovirus - Papovavirus - Rotavirus	0.25	2.5	15 min.
Rotavirus	0.5	5	5 min.
Viricida frente a virus no encapsulados (de acuerdo con RKI (autoridad alemana) recomendación 01/2004)	0.5	5	1 h.
	0.75	7.5	30 min.
Esporicida (<i>Clostridium difficile</i>) EN 13704 y prueba Exner (J. Hosp. Infect. 2004; 56 (Suppl. 2): S 70-75)	2	20	1 h.

1) con acción mecánica, y condiciones limpias y sucias de acuerdo al método 2001 de la DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología)

MODO DE EMPLEO

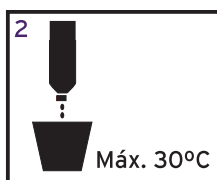

1 Utilizar guantes de protección para manipular y aplicar el producto.


2-3 Preparar una dilución de producto. No utilizar con agua muy caliente (max. 30° C.). No pulverizar.

4 Fregar en mojado o utilizar una bayeta absorbente, asegurándose de que las superficies se mojan completamente. Dejar actuar según el tiempo indicado en la tabla de recomendaciones.

Se recomienda usar **Incidin® Rapid** en combinación con el sistema de mopas **rasanTEC®** y las bayetas **Polifix®** de Ecolab para conseguir los mejores resultados de limpieza e higiene.

CARACTERÍSTICAS

pH (100%):

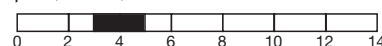

PRESENTACIÓN

1 x 6 L

3 x 2 L

ALMACENAMIENTO

Conservar sólo en el envase original a una temperatura no superior a 25°C. No trasvasar y mantener el recipiente bien cerrado.

SEGURIDAD

Sólo para uso profesional. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto y leer detenidamente la etiqueta del producto antes de su utilización. Cumple la legislación vigente respecto a Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de Detergentes.

INGREDIENTES

Cada 100g de **Incidin® Rapid**, contienen 9.8 g de Glutaral, 5.0 g de Cloruro de benzalconio, 5.0 g de Cloruro de Didecildimetilamonio.

Registro Oficial de BIOCIDAS, INCIDIN RAPID DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO ÁREA SANITARIA, No. Reg. AGEMED 625-DES

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4, 7ª Pl.
08970 Sant Joan Despí - Barcelona

